



MADE IN ITALY


KING BATHROOM STOOLS AND ACCESSORIES

EN USER MANUAL
DE BENUTZERHANDBUCH
FR MANUEL DE L'UTILISATEUR
ES MANUAL DE USUARIO
IT MANUALE D'USO
PT MANUAL DO USUÁRIO
SL NAVODILA ZA UPORABO
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
SK POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
CS UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LT VARTOTOJO VADOVAS
ET KASUTUSJUHEND
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
FI OHJEKIRJA
SV ANVÄNDARMANUAL
NL HANDLEIDING



KING-ST-KN
KING-STA-KN
KING-BST-KN
KING-BSTA-KN

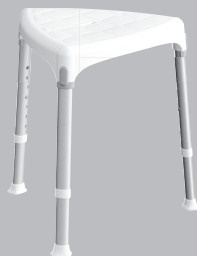

KING-STT-KN
KING-STTA-KN
KING-BSTT-KN
KING-BSTTA-KN



KING-STR-KN
KING-STRA-KN
KING-BSTR-KN
KING-BSTRA-KN



KING-STRR-KN
KING-STRRA-KN
KING-BSTRR-KN
KING-BSTRRA-KN



KING-CST2-KN
KING-CST4-KN



KING-CSTT2-KN
KING-CSTT4-KN



KING-CSTR2-KN
KING-CSTR4-KN



KING-CSTRR2-KN
KING-CSTRR4-KN



KING-RD-KN
KING-BRD-KN

KING TABORETY

STAŁE LUB Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

PRZEZNACZENIE:

Produkty z linii *Taborety KING* pozwalają na zwiększenie niezależności podczas codziennej higieny osobistej pod prysznicem, zmniejszając zmęczenie mięśni spowodowane pozycją stojącą, a także ryzyko poślizgnięcia się i urazu. Wersje wyposażone w antypoślizgowe gumowe stopki zapewniają lepszą przyczepność do podłogi, a modele z regulacją wysokości nóg pozwalają użytkownikom na łatwą zmianę całkowitej wysokości w zależności od potrzeb. Wersje wyposażone w obrotowy dysk zwiększają swobodę ruchu bez konieczności wstawiania z taboretu. Dzięki swojej elastyczności, taborety mogą być ustawiane nawet na wyboistej i nieregularnym podłożu, jak popularne brodziki prysznicowe. Taborety są dostępne w trzech różnych kształtach. Taborety można łatwo przenosić ze względu na ich niewielką wagę. Taborety można uzupełnić o miękką poduszkę, aby korzystanie z nich było bardziej komfortowe. Miękkie poduszki i tarcze obrotowe są dostępne oddzielnie jako akcesoria.

WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA:

Produkty z linii *Taborety KING* są przeznaczone dla osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z ograniczoną ruchomością odcinka lędźwiowego, kolanowego lub biodrowego oraz wszystkich tych, którzy mają trudności z utrzymaniem pozycji stojącej podczas prysznicowych etapów codziennej higieny osobistej. Od użytkownika wymagana jest niezależność w utrzymywaniu równowagi podczas siadania i stania, a także odpowiednia zdolność do utrzymania pozycji siedzącej. Taboret nie może być używany, jeśli użytkownik ma problemy związane z równowagą lub zaburzeniami percepcji.

OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie wolno przekraczać maksymalnej wagi użytkownika wskazanej w instrukcji obsługi.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że taboret jest prawidłowo zmontowany w stabilnej pozycji.
- Taboret może być używany wyłącznie na powierzchni wolnej od przeszkód.
- Podczas montażu należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
- Podczas procesu montażu istnieje ryzyko obrażeń palców
- Nie należy huśtać się na taborecie; może to doprowadzić do poślizgnięcia lub przewrócenia. Taboret prysznicowy należy zawsze stawiać na 4 nogach.
- Nie należy modyfikować taboretu ani jego elementów w żaden sposób.
- Nie używaj taboretu, jeśli jest uszkodzony lub zmieniony w jakikolwiek sposób.
- Po użyciu taboret należy zdjąć z brodzika.
- Nie należy używać taboretu do celów innych niż zamierzone.
- Taboretu nie wolno przechowywać na zewnątrz.

INFORMACJE O KONSERWACJI:

Konserwacja produktu obejmuje procedury czyszczenia i odkażania. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie i odpowiedni standard higieny, użytkownik powinien wykonać te procedury przed każdym użyciem. Użytkownik musi upewnić się co do integralności strukturalnej urządzenia i jego komponentów, a także sprawdzić dokręcenie śrub. W przypadku procedur czyszczenia i odkażania należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Należy założyć rękawice ochronne.
2. Przed przystąpieniem do dokładniejszej dezynfekcji, najpierw należy usunąć widoczne zabrudzenia.
3. Do czyszczenia należy używać wody lub nieagresywnego detergentu.
4. Przetrzeć suchą i czystą szmatką.

Alternatywnie, produkt może być czyszczony w domowych zmywarkach w maksymalnej temperaturze. Miękką poduszkę należy czyścić wyłącznie ręcznie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO UŻYCIA:

Produkt nadaje się do ponownego użycia przez innych użytkowników. Przed ponownym użyciem przez inne osoby produkt musi zostać prawidłowo wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed przekazaniem produktu innym osobom produkt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanych sprzedawców.







PRAWIDŁOWA PROCEDURA UTYLIZACJI:

Nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów domowych. Należy wcześniej zapytać lokalne władze o prawidłowy i przyjazny dla środowiska sposób utylizacji.


ZGŁASZANIE INCYDENTÓW:

W przypadku poważnego incydentu związanego z użytkowaniem tego produktu należy skontaktować się z producentem tego produktu pod adresem info@kingbathrooms.com oraz odpowiedzialnym organem w danym kraju.


KOD PRODUKTU	OPIS	STRONA
KING-ST-KN	Taboret prysznicowy kwadratowy	44
KING-STA-KN	Taboret prysznicowy kwadratowy, regulowany	45
KING-STR-KN	Taboret prysznicowy okrągły	44
KING-STRA-KN	Taboret prysznicowy okrągły, regulowany	45
KING-STT-KN	Taboret prysznicowy trójkatny	44
KING-STTA-KN	Taboret prysznicowy trójkatny, regulowany	45
KING-STRR-KN	Taboret prysznicowy okrągły, obrotowy	44
KING-STRRR-KN	Taboret prysznicowy okrągły, obrotowy, regulowany	45
KING-BST-KN	Czarny taboret prysznicowy kwadratowy	44
KING-BSTA-KN	Czarny taboret prysznicowy kwadratowy, regulowany	45
KING-BSTR-KN	Czarny taboret prysznicowy okrągły	44
KING-BSTRA-KN	Czarny taboret prysznicowy okrągły, regulowany	45
KING-BSTT-KN	Czarny taboret prysznicowy trójkatny	44
KING-BSTTA-KN	Czarny taboret prysznicowy trójkatny, regulowany	45
KING-BSTRR-KN	Czarny taboret prysznicowy okrągły, obrotowy	44
KING-BSTRRR-KN	Czarny taboret prysznicowy okrągły, obrotowy, regulowany	45
KING-CST2/4-KN	Miękka poduszka do taboretu prysznicowego kwadratowego, kolor jasno niebieski/szary	46
KING-CSTR2/4-KN	Miękka poduszka do taboretu prysznicowego okrągłego, kolor jasno niebieski/szary	46
KING-CSTRR2/4-KN	Miękka poduszka do taboretu prysznicowego okrągłego, obrotowego, kolor jasno niebieski/szary	46
KING-CSTT2/4-KN	Miękka poduszka do taboretu prysznicowego trójkatnego, kolor jasno niebieski/szary	46
KING-RD-KN	Dysk Obrotowy Do Taboretu Prysznicowego	47
KING-BRD-KN	Czarny Dysk Obrotowy Do Taboretu Prysznicowego	47

IKONA	OPIS
	Wyprodukowane we Włoszech
	Beznarzędziowy montaż
	Można myć w zmywarce
	Maksymalna waga użytkownika
	2 lata gwarancji
	Zeskanuj KOD QR, aby zobaczyć film montażowy


KING-ST-KN
KING-BST-KN

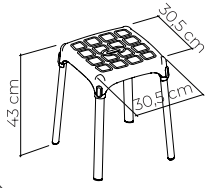


KING-STR-KN
KING-BSTR-KN

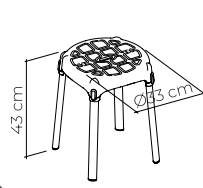

KING-STT-KN
KING-BSTT-KN

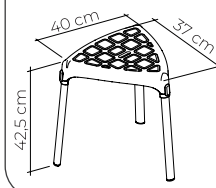

KING-STRR-KN
KING-BSTRR-KN

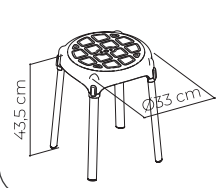


1



x1



x4

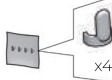

x4



x1



x4



x4



x1



x3



x3



x1




x4




x4

2

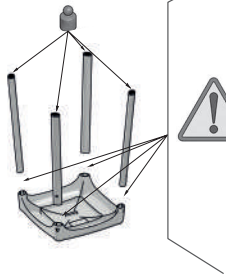

3

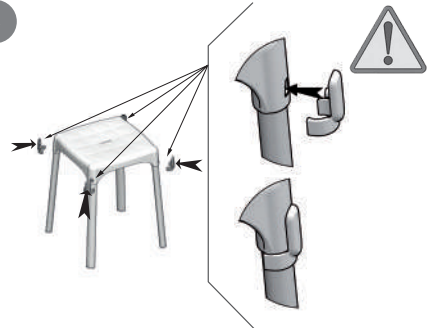

4




120 kg
265 lg




CE MD


KING-STA-KN
KING-BSTA-KN

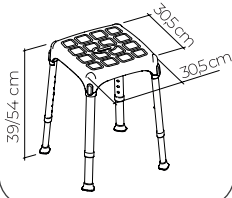


KING-STRA-KN
KING-BSTRA-KN

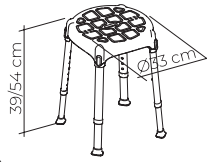





KING-STTA-KN
KING-BSTTA-KN

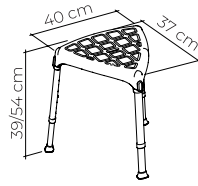


KING-STRRA-KN
KING-BSTRRA-KN

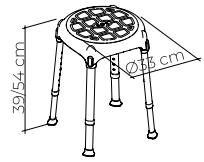


1

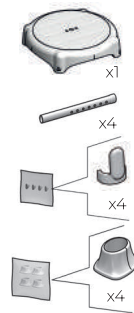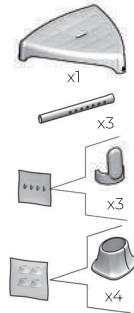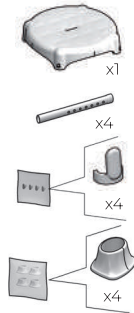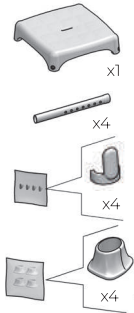


2

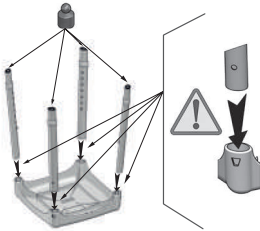


3

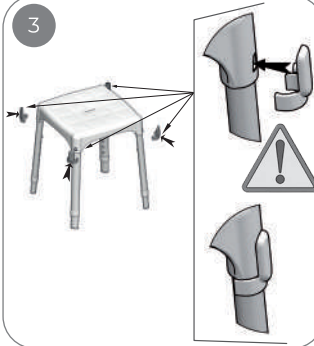


4

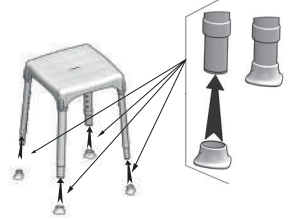

5

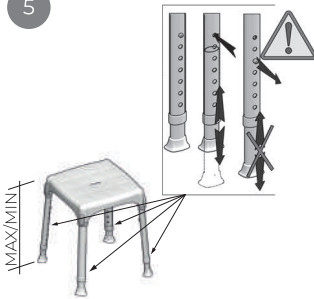

6

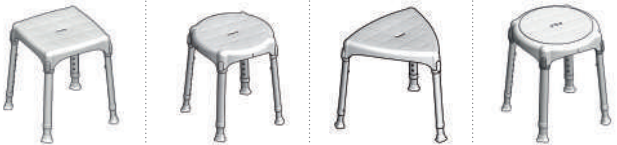


120 kg
265 lb




CE MD


KING-CST2-KN
KING-CST4-KN

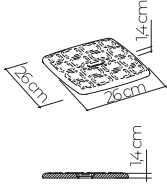


KING-CSTR2-KN
KING-CSTR4-KN

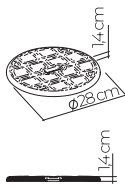

KING-CSTT2-KN
KING-CSTT4-KN

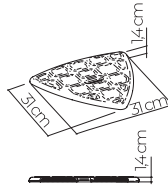

KING-CSTRR2-KN
KING--CSTRR2-KN

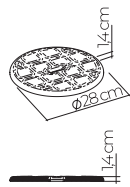


1



2



3

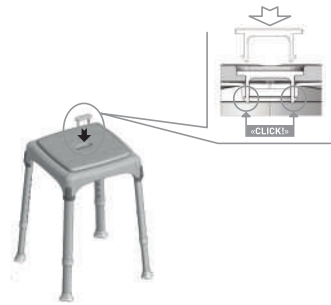

4




120 kg
265 lg



MADE IN P.R.C.


KING-RD-KN
KING-BRD-KN

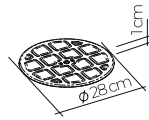


1



2

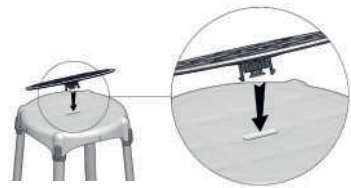

3

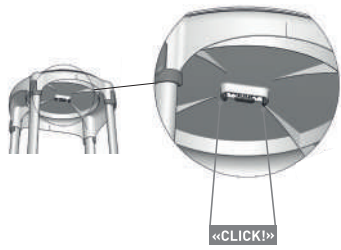

4



120 kg
265 lg



CE MD



Manufactured by



LM Global Design Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey,
Dublin 7, D07 VY68, Ireland



Distributed by:



www.kingbathrooms.com
info@kingbathrooms.com