

Instrukcja obsługi



SALVACEL

- Pas na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką **kod produktu:** SVC 2476 XL
- Rękowice ochronne **kod produktu:** SVC 2500/SVC2510

PASY DO PRZENOSZENIA CHORYCH

- Pas do przenoszenia chorych z uchwytyami i klamrą **kod produktu:** STMT 6512/STMT 6513

Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. SALVACEL

2.1 Pas na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką

Zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjentom oraz umożliwiają opiekunom zaoszczędzić czas konieczny do unieruchomienia chorego. Pasy chronią przed obrażeniami i skaleczeniami skóry unieruchamiając pacjenta i nie dopuszczając do powstawania urazów. Wewnętrzna część wykonana jest w 75% z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna część z weluru zapinanego poprzez pas z rzepem i metalową sprzączką.



1. Nałóż pas na nadgarstek lub kostkę pacjenta. Metalowa sprzączka powinna znajdować się na zewnętrznej stronie. Wyreguluj i zapnij pasek na rzep.
2. Przełóż pasek przez metalowy pierścień i dwukrotnie owiń nim nadgarstek.
3. Przymocuj pas do ramy łóżka. Zapewni to silne, bezpieczne i komfortowe unieruchomienie pacjenta.

Kod	Rozmiar
SVC 2476XL	L

2.2 Rękawice ochronne

Zapewniają skuteczniejszą ochronę nie dopuszczając do samookaleczeń pacjenta i powstawania urazów. Kończyny górne w obrębie dłoni są zabezpieczone w specjalnej rękawicy wykonanej z miękkiego weluru oraz oddychającej siateczki. Łatwa i szybka regulacja poprzez zapięcie na rzep.



Kod	Rozmiar
SVC 2500	M
SVC 2510	L

3. PASY DO PRZENOSZENIA CHORYCH

3.1 Pas do przenoszenia chorych z uchwytami i klamrą

Wykorzystywany jest jako element wspomagający terapeutów, pielęgniarki i opiekunów w opiece nad pacjentem. Zapinany od przodu na klamrę wykonany jest ze specjalnie wzmocnionej tkaniny z możliwością regulacji długości zapięcia. Pas pozwala na bezproblemowe przemieszczenie pacjenta w pozycji siedzącej, nie obciążając kręgosłupa pacjenta i opiekuna poprzez mocną tkaninę, precyzyjne obszycie, wewnętrzny materiał antypoślizgowy oraz zewnętrzne uchwyty.





Kod	Rozmiar
STMT 6512	M (dł. 117 cm, szer. 13 cm)
STMT 6513	L (dł. 128 cm, szer. 14 cm)

4. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

5. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Wytwórca
LOT	Numer partii		Data produkcji
SN	Numer seryjny	EC REP	Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

6. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwoślizgowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: **www.timago.com**



Wytwórca:

MEDICARE SYSTEM

Abad Escarreé 15

08302 Mataro

Spain



Wydanie I, data aktualizacji 15.01.2013