

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

Kula łokciowa - aluminiowa AR-010

Kula łokciowa - aluminiowa z miękkim uchwytem Softi. AR-010M

Dziecięca kula łokciowa - aluminiowa z miękkim uchwytem. TupTup. AR-010K

Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą AR-024

Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą i miękkim uchwytem Pro-Soft. AR-024M

Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą, ergonomiczny uchwyt AR-025

*Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście.
Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję,
że będzie produktem znacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w
codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.*

Przeznaczenie oraz opis wyrobu:

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane są z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, uchwyty z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy. Technologia lakierowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z kuli łokciowej – **120 kg**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy są w całości, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy z tworzywa nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć
3. Sprawdzenie czy kula posiada założoną nasadkę gumową antypoślizgową
4. Sprawdzenie czy główka zatrzasku do regulacji wysokości znajduje się w wyciętym otworze



W celu uniknięcia urazów:

1. Niezbędne jest każdorazowo sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów)
2. Używać tylko po dopasowaniu właściwej wysokości do użytkownika.
3. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni.
4. Nie wolno przeciągać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
5. Należy używać kuli tylko i wyłącznie w pozycji „zablokowanego” zatrzasku” regulacji wysokości.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie.

DDIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

Prawidłowe użytkowanie: Kule łokciowe należy dopasować tak, aby uchwyt znajdował się na wysokości biodra, a łokieć był lekko zgięty (ok. 20-30 stopni). Użytkownik powinien chwycić rączkę, a przedramię oprzeć w obejmie.

Spóśób konserwacji: Kulę łokciową należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów posiadających atest PZH. Po dokonaniu takiej czynności kulę należy wytrzeć/ osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Elementy gumowe (nasadka gumowa antypoślizgowa) jest elementem zużywalnym i musi być regularnie wymieniana na nową.

Incydenty: Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Utylizacja: Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

SYMBOLE:



Wyrób
medyczny



Zapoznaj
się z
instrukcją



Producent



Wyrób spełnia
wymagania
UE



Ostrzeżenie



Nr daty /
serii



Data
produkcji
m-c-rok



Nadaje
się do
recyklingu



Selektywna
zbiórka
odpadów

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75, udziela niniejszym 18-miesięcznej gwarancji na kulę łokciową.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia do prawidłowego stanu użytkowego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane po przedstawieniu dowodu zakupu i karty gwarancyjnej
6. Do reklamacji przyjmowane są produkty w należyтым stanie higienicznym (czyste)
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych, zetknięcia produktu z gorącą powierzchnią (elementy z gumy i PVC). Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu wynikającego z użytkowania jak również elementów zużywalnych (nasadek gumowych)
8. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek przerobek i zmian konstrukcyjnych produktu dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
9. W przypadku nieuzasadnionej/odrzuconej reklamacji koszty transportu do producenta ponosi klient reklamujący towar.

Model / Numer LOT	Pieczęć punktu sprzedaży i czytelny podpis
Data sprzedaży:	



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel. fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



Wydanie 9 z dnia 15.04.2026r.