

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny)

Kod produktu: FS 913L




1. Wykonanie

Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny) wykonany jest ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Balkonik pełni dwie funkcje: statyczną i kroczącą, która umożliwia naprzemienne przemieszczanie boczaków bez konieczności podnoszenia. Posiada klipsy blokujące służące do zmiany funkcji, szerokie pole podparcia oraz stabilny i długi zakres kroczenia. Miękkie piankowe uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę używania. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki regulowanym nóżkom. Gumowe nakładki zapobiegają ślizganiu się. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

Elementy balkonika:

- a. uchwyt
- b. klips składania ramy
- c. funkcja statyczna
- d. funkcja krocząca
- e. regulacja wysokości-sztyft blokujący
- f. gumowa nasadka antypoślizgowa

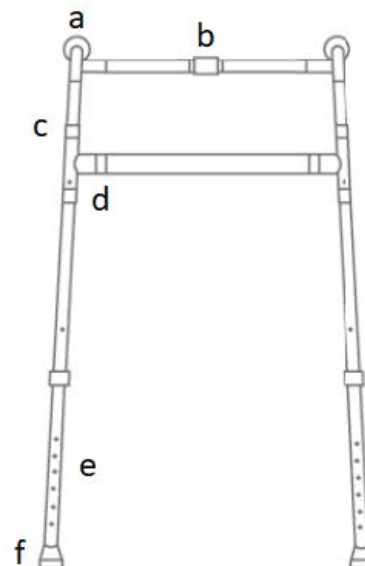

2. Zastosowanie

Balkonik krocząco-statyczny jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia.

Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie balkonika

- Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów.
- Aby złożyć balkonik, należy docisnąć plastikowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i złożyć ramiona.

Regulacja wysokości

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Sztyfty na wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

Wybór funkcji

- Statyczna - należy wyjąć klipsy blokujące umieszczone na poziomym, górnym elemencie wzmacniającym ramę i przełożyć w otwory znajdujące się na tej samej wysokości na pionowym elemencie ramy.
- Krocząca - klipsy blokujące należy umieścić ponownie w otwory montażowe w poziomym elemencie wzmacniającym.

4. Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|--------------------|
| Szerokość całkowita | 46 cm |
| Szerokość wewnętrzna | 44 cm |
| Głębokość całkowita | 47 cm |
| Regulacja wysokości | 78-96 cm |
| Waga | 2,4 kg |
| Max obciążenie | 100 kg |
| Kolor ramy | srebrny, miedziany |

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z balkoniku, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.










6. Konserwacja

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
|  | Numer referencyjny |  | Producent |
|  | Numer serii |  | Data produkcji |
|  | Numer seryjny |  | Wyrób medyczny |
|  | Uwaga |  | Zapoznaj się z instrukcją |
|  | Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. | | |

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021