

Instrukcja obsługi Lampa na podczerwień

GYILP-C-150



Spis treści

I. Zalety światła podczerwonego	1
II. Ważne wskazówki bezpieczeństwa	1
III. Dane techniczne i elementy	2
IV. Obsługa	3
V. Przydatne wskazówki	3
VI. Konserwacja i naprawy	4
VII. Procedura utylizacji	4

Importer: Technoana Kraśnik Górny 22, 59-700 Bolestawiec
Producent: HAINING GUANYI ELECTRICAL CO., LTDROOM 15D, BLS GROUP BUILDING, NO.338 HAINING AVENUE, HAINING CITY, ZHEJIANG, CHINA. 314400

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem urządzenia oraz zachowanie jej do późniejszego wykorzystania. Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia „Ostrzeżenie” i „Ważne”, które wskazują, że nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia ciała i/ lub uszkodzenia materialne.

I. Zalety światła podczerwonego

Dobroczynne działanie ciepła podczerwonego jest powszechnie znane. Promienie podczerwone wnikają w głąb skóry, stymulując przepływ krwi, co pomaga przyspieszyć gojenie, łagodzić drobne bóle mięśni, rozluźniać mięśnie i zmniejszać sztywność stawów. Zalecane w takich przypadkach jak bóle pleców, łokieć tenisisty, nadwyrężenia mięśni i bolesność. Niezastąpione dla sportowców, ogrodników, zapracowanych mam i aktywnych osób w każdym wieku.

II. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do naświetlania ciała ludzkiego i wyłącznie do użytku domowego.
2. Zabrania się naświetlania tym urządzeniem niemowląt i dzieci poniżej 14 roku życia.
3. Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby, które nie zapoznały się z jego działaniem i sposobem użycia.
4. Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Naświetlanie musi odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
5. Aby zapobiec przegrzaniu oraz ryzyku poparzenia lub pożaru, należy używać urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
6. Nigdy nie przykrywaj urządzenia kołdrą, kocem ani innymi materiałami.
7. Nie dotykaj urządzenia ani nie wyjmuj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami, gdy jest ono podłączone do źródła zasilania.
8. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
9. Aby zapobiec porażeniu prądem, urządzenie musi być utrzymywane w suchości i nie może być używane w wilgotnym lub mokrym środowisku.
10. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub obudowa są uszkodzone.
11. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód. Nie pozwól, aby przewód był nadmiernie naciągany lub skręcany. Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
12. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła (żarówkę) bez ochrony oczu, gdy urządzenie jest włączone.
13. Nie dotykaj żarówki ani obudowy, gdy urządzenie pracuje lub stygnie – istnieje ryzyko poparzenia.
14. Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
15. Nie upuszczaj urządzenia – upadek może uszkodzić szklaną żarówkę na podczerwień lub inne elementy.

1

4

Procedura utylizacji: (dyrektywa unijna DIR. 2002/96/EC WEEE)
Symbol na urządzeniu wskazuje, że podlega ono segregacji odpadów elektronicznych i elektronicznych. Po zużyciu urządzenia nie wolno wyrzucać go tak jak innych stałych odpadów domowych ale oddać je do odpowiedniego teritorialnie centrum utylizacyjnego lub zwrócić je sprzedawcy w przypadku kupowania nowego urządzenia tego samego typu, które będzie spełniało tę samą funkcję. UWAGA! Niewłaściwe pozbycie się urządzeń elektronicznych i elektronicznych może być karalne.



Ostrzeżenie dotyczące konserwacji i napraw
1. Ryzyko porażenia prądem! Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności urządzenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego i upewnić się, że jest całkowicie zimne.
2. Czyszczenie nie może być wykonywane przez dzieci.
3. Nie rozpylaj wody bezpośrednio na urządzenie ani nie zanurzaj go w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.
4. Nie mój urządzenia w zmywarce.
5. Nie używaj szorstkich gąbek ani detergentów ściernych.
6. Po czyszczeniu urządzenia musi być całkowicie suche, zanim zostanie ponownie użyte.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi lub autoryzowanemu serwisowi, aby uniknąć zagrożenia.
8. Jeśli po wymianie żarówki urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani demontować go.

Wymiana żarówki:
Żarówka może się przepaść. Aby ją wymienić należy odkręcić starą żarówkę obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie wkręcić nową żarówkę. Nie używać zbyt wielkiej siły przy wkręcaniu aby nie uszkodzić żarówki - można skaleczyć się szkłem.
16. Osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji nie powinny demontować obudowy ani wymieniać przewodu zasilającego.
17. Przechowywanie urządzenia w miejscu niedostępnym dla dzieci.
18. W przypadku ciąży nie należy stosować urządzenia w okolicy brzucha. Przed zastosowaniem na inne partie ciała skonsultuj się z lekarzem.
19. Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek implanty, zwłaszcza w obszarze ciała przeznaczonym do naświetlania. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
20. Nie stosuj na obszarach skóry z nadwrażliwością.
21. Nie stosuj w okolicach narządów płciowych.
22. Nie stosuj u osób nieprzytomnych lub śpiących.
23. Osoby z następującymi schorzeniami nie powinny używać urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem:
- gruźlica,
- nowotwory łagodne i złośliwe,
- krwotoki,
- stany zapalne skóry,
- zapalenie żył i zakrzepica,
- uszkodzona skóra (otwarte rany),
- zylaki,
- zaburzenia krążenia.

3

V. Przydatne wskazówki
1. Przed przystąpieniem do naświetlania wybranej partii ciała, zbliż dłonie do lampy, aby sprawdzić temperaturę. Jeśli temperatura jest niekomfortowa, dostosuj poziom mocy lub zwiększ odległość lampy od ciała.
2. Przerwij użytkowanie, jeśli odczuwasz dyskomfort, pieczenie, zauważysz nadmierne zaczerwienienie lub obrzęk w naświetlanym miejscu. Niewielkie, przejściowe zaczerwienienie jest normalne.
3. Jeśli stosujesz na skórę balsamy, kremy lub olejki, przed naświetlaniem zabezpiecz to miejsce cienką szmatką lub ręcznikiem papierowym.
4. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie urządzenia 20-30 minut raz lub dwa razy dziennie. Nie przekraczaj 40 minut na jedną sesję. W razie wątpliwości co do optymalnego czasu trwania terapii skonsultuj się z lekarzem.

Uwaga: Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu naświetlania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie jest gorące po użyciu. ostygnie.
Aby ręcznie wyłączyć lampę przed upływem ustawionego czasu, naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aż wszystkie wskaźniki mocy zgasną, a lampa się wyłączy.
Po włączeniu lampy domyślnie ustawiony jest czas 10 minut (poziom 1). Aby zmienić czas, naciśnij przycisk timera – odpowiedni wskaźnik zaświeci się na czerwono. Po upływie ustawionego czasu lampa wyłączy się automatycznie.
- Poziom 1: 10 minut
- Poziom 2: 20 minut
- Poziom 3: 30 minut
- Poziom 4: 100%

2. Timer (automatyczne wyłączenie). Lampka posiada 3 ustawienia czasu pracy:
(4), naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz spowoduje jej wyłączenie.
zmienia moc na wyższy poziom. Gdy lampka pracuje na najwyższym poziomie mocy poziomu mocy 1 (kolor czerwony). Ponowne naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby włączyć lampę. Zażwieci się wskaźnik poziomu mocy 1 (kolor czerwony).
- Poziom 1: 50%
- Poziom 2: 70%
- Poziom 3: 80%
- Poziom 4: 100%

IV. Obsługa
Ważne: Przed użyciem upewnij się, że usunięto wszystkie materiały z opakowania, a urządzenie i akcesoria nie są widocznie uszkodzone. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą. Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej i równej powierzchni.

1. Włączanie i regulacja mocy. Lampka ma 4 poziomy mocy:

