



variteks
you must go on



Stabilizator kolana **884** to produkt wspomagający terapię cieplną i kompresyjną stawu kolanowego. Stosowanie zgodnie z instrukcją oraz regularne czyszczenie zapewniają jego długą żywotność i skuteczność. W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania skonsultuj się z lekarzem.

Zakładanie stabilizatora:

1. Upewnij się, że stabilizator jest odpowiedniego rozmiaru, dopasowanego do Twojej nogi.
2. Otwórz rzepy stabilizatora, aby przygotować go do założenia.
3. Umieść stabilizator na kolanie tak, aby pokrywał obszar stawu kolanowego.
4. Owiń stabilizator wokół nogi i zapnij rzepy, zaczynając od dolnego, a następnie górnego. Dopasuj je tak, aby stabilizator przylegał wygodnie, ale nie ograniczał krążenia krwi.
5. Upewnij się, że stabilizator jest prawidłowo założony, równomiernie przylega do nogi i zapewnia odpowiednie wsparcie.

Codzienne użytkowanie:

- Stabilizator może być noszony przez cały dzień, jeśli lekarz nie zalecił inaczej.
- Jeśli stabilizator powoduje dyskomfort lub uczucie ucisku, zdejmij go i dopasuj ponownie.
- Zdejmij stabilizator na noc, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Czyszczenie i konserwacja:

- Stabilizator należy prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Po umyciu spłucz dokładnie wodą i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie pierz w pralce, nie używaj wybielaczy ani suszarki bębnowej.
- Unikaj ekspozycji na bezpośrednie źródła ciepła, takie jak kaloryfery, aby zapobiec uszkodzeniom neoprenu.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Nie zakładaj stabilizatora zbyt ciasno, aby uniknąć ograniczenia krążenia krwi.
2. Nie używaj stabilizatora na otwartych ranach, skaleczeniach lub podrażnionej skórze.
3. Regularnie sprawdzaj stabilizator pod kątem uszkodzeń, takich jak rozdarcia lub zużycie rzepów.

Producent: **Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.**

Ferhatpaşa Sb. Mah. Menekşe Sk. Variteks Blok No:3 İç Kapı No:Z1, 34540 Çatalca - İstanbul/Türkiye
info@variteks.com



4. W przypadku reakcji skórnych, takich jak swędzenie, zaczerwienienie lub wysypka, zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
5. Trzymaj stabilizator poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować stabilizatora w przypadku ostrych stanów zapalnych stawu kolanowego bez konsultacji z lekarzem.
- Stabilizator nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku znacznych deformacji stawu kolanowego bez zaleceń medycznych.
- Nie używać w przypadku alergii na materiały, z których wykonany jest stabilizator (neopren).

Dane techniczne:

- Skład: 80% Neopren, 20% Nylon
- Stabilizator nosić jak na zdjęciu
- Do stosowania zgodnie z zaleceniem lekarza
- Wyrób medyczny

Produkty Variteks są wyrobem medycznym, używaj je zgodnie z instrukcją lub etykietą.

Producent: **Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.**

Ferhatpaşa Sb. Mah. Menekşe Sk. Variteks Blok No:3 İç Kapı No:Z1, 34540 Çatalca - İstanbul/Türkiye
info@variteks.com

